

CHECK LIST DE MANTENIMIENTO PARA HERRAMIENTAS DE CIRUGÍA

RESPONSABLE		FECHA
Antes de la cirugía		
	Revisar estado físico: sin óxido, manchas ni deformaciones	
	Comprobar el filo y alineación de tijeras, pinzas y agujas	
	Verificar la limpieza previa y que el material esté esterilizado	
	Confirmar que cada instrumento esté completo (incl. accesorios)	
Durante la cirugía		
	Manipular con guantes limpios y técnica aséptica	
	Usar cada instrumento para su función específica	
	Evitar golpes, torsiones o esfuerzos mecánicos innecesarios	
	Mantener húmedos los instrumentos si la cirugía es larga	
Después de la cirugía		
	Retirar restos orgánicos con agua destilada o solución enzimática	
	Lavar con cepillo suave: nunca estropajos ni abrasivos	
	No mezclar diferentes metales al lavar	
	Secar completamente con paño sin pelusa o aire caliente	
Esterilización y almacenaje		
	Comprobar que los instrumentos estén completamente secos	
	Lubricar articulaciones si aplica (aceite médico sin silicona)	
	Colocar en bandejas perforadas o envoltorios apropiados	
	Esterilizar según protocolo (autoclave o calor seco según material)	
	Guardar en lugar limpio, seco y bien ventilado	
Mantenimiento periódico		
	Revisar funcionalidad una vez al mes	
	Registrar inspecciones y esterilizaciones en una hoja de control	
	Sustituir herramientas desgastadas o dañadas	
	Formar al personal nuevo sobre el correcto manejo	